

УХОД ЗА ИЗДЕЛИЕМ

Перед стиркой достать металлические пластины — рёбра жесткости. Использовать ручную стирку мягкими моющими средствами при температуре не выше +30°C. Во время стирки не тереть и не выкручивать. При сушке избегать контакта с прямыми источниками тепла. Не гладить. Не отбеливать (не использовать моющие средства, содержащие хлор). Не подвергать сухой химической чистке. Не подвергать воздействию высоких температур (выше +120°C).

Состав: хлопок 40%, нейлон 30%, поливискон 15%, эластан 15%, заставка Velcro (липучка), 2 металлических ребра жесткости, 4 пластиковых ребра жесткости.


Условия хранения: хранить в сухом месте при температуре от +5°C до +40°C, вдали от источников тепла, прямого солнечного света и пыли.

Срок хранения: 5 лет от даты изготовления. После окончания срока хранения производитель не гарантирует сохранение достаточной эластичности изделия.

Гарантийный срок: 12 месяцев с даты покупки.

Дата производства: см. на упаковке.

Размер: см. на упаковке.

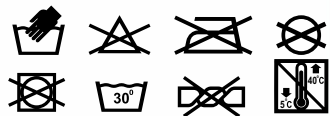

Производитель: Хегели Ортопедик Урунлер Сан. Ве Тик. Лтд. Сти. Джихангир
Мах. Сехит Пиядебр Явуз Бахар Сок. №:4 Мираббо СанаиСитези Д: Блат Кат: 3
Амбарли, Авджилар, Стамбул, Турция.

www.prolife-orto.com

Prolife® is the registered trademark by Montex Swiss AG,
Tramstrasse 16, CH-9442, Berneck, Switzerland



Корсет грудно-поясничный

ARC330K

ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

Корсет изготовлен из высококачественного материала с содержанием 40% хлопка, что делает использование корсета максимально безопасным и комфортным. Наличие шести ребер жесткости обеспечивает плотное прилегание изделия, что повышает эффективность его фиксирующего воздействия. Высокое качество изделия подтверждено международными и европейскими сертификатами на соответствие стандартам качества ISO 9001:2008, ISO 13485:2012, EN 14971:2004, MDD 93/42/EEC.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

- Искривления грудного отдела позвоночника (кифозы, сколиозы I–II степени).
- Профилактика различных форм нарушения осанки.
- Реабилитация после травм и операций грудного и поясничного отделов позвоночника.

ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ

- Корсет изготовлен из воздухопроницаемого материала, который обеспечивает комфорт при использовании в любое время года. Прочность и эластичность материала создает необходимую фиксацию и поддержку.
- Корсет имеет дополнительные ленты, которые усиливают фиксацию позвоночника и облегчают подгонку изделия по размеру.
- Наличие ребер жесткости в изделии позволяют снизить нагрузку на позвоночник и обеспечить надежную поддержку в грудном и поясничном отделах позвоночника.
- Дополнительная съемная подушечка обеспечивает плотное прилегание корсета к телу для усиления фиксации в поясице.
- Интегрированная петля помогает зафиксировать изделие без дополнительных усилий и посторонней помощи.

ПРИМЕНЕНИЕ

Изделие рекомендуется надевать на нижнее белье, лежа на спине на ровной жесткой или полужесткой поверхности. Изделие необходимо надевать широкой частью на поясницу. На глубоком вдохе при втянутом животе необходимо зафиксировать пояс на животе с помощью застежки-липучки. Дополнительно зафиксировать эластичные ремни с помощью застежки-липучки. Отрегулируйте прилегание изделия, учитывая особенности фигуры.

ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИЗДЕЛИЯ

От 2 до 12 часов в сутки в зависимости от состояния здоровья и рекомендаций врача. Индивидуальный режим и сроки ношения определяет врач. Необходимость применения изделия дольше, чем предписано курсом лечения, должна быть согласована с врачом. Не прекращать использование изделия без согласования с врачом.

ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Перед началом использования изделия проконсультируйтесь с врачом. Не допускается самостоятельное изменение конструкции изделия. Не допускается эксплуатация поврежденного изделия.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Местные заболевания кожи, беременность являются противопоказаниями для применения изделия. При гиперчувствительности к компонентам материала изделие необходимо надевать на нижнее белье. Не надевать изделие при использовании согревающих мазей в области поясницы.

Подбирать размер необходимо непосредственно по обхвату талии согласно таблице:

| Область измерения | Размеры | | | | |
|-------------------|---------|-------|--------|---------|---------|
| | S | M | L | XL | XXL |
| Обхват талии, см | 70-80 | 80-90 | 90-100 | 100-110 | 110-120 |



При измерении обхвата талии сантиметровая лента должна плотно прилегать к телу, не нужно слишком ее натягивать или ослаблять.

СХЕМА НАДЕВАНИЯ

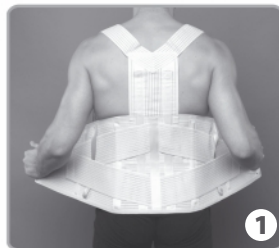


СХЕМА НАДЕВАНИЯ

